

RECHERCHE D'AMIBES TELLURIQUES et EXAMEN MYCOLOGIQUE

Grattage de cornée et lentilles

Prélèvements

KIT DE PRELEVEMENT A VENIR CHERCHER AU LABORATOIRE AVANT LE PRELEVEMENT

ATTENTION UN KIT POUR CHAQUE OEIL

Grattage de cornée :

ATTENTION : Bien identifier les tubes, les écouvillons, la lame et sa boîte de transport avec Nom et prénom du patient et œil droit ou œil gauche

- Effectuer une anesthésie locale (Novésine)
- **Prélèvement mycologique :**
Humecter stérilement les 2 écouvillons secs dans un tube contenant de l'eau physiologique stérile.
Avec chacun des écouvillons, frotter de manière « appuyée » la lésion.
Jeter le tube.
- **Prélèvement parasitologique : Culture d'amibes**
Avec un scalpel stérile gratter la cornée et déposer le grattage dans le cercle de la lame (bien s'assurer que le prélèvement est collé sur la lame)
Mettre la lame dans la boîte de transport
Avec un second scalpel stérile effectuer un deuxième grattage et décharger la lame du scalpel dans un tube contenant de l'eau physiologique stérile.
Revisser le tube et jeter le scalpel
- **Prélèvement parasitologique : PCR d'amibes**
Avec un troisième scalpel stérile effectuer un dernier grattage et décharger la lame du scalpel dans un tube contenant de l'eau physiologique stérile.
Revisser le tube et jeter le scalpel.

Lentilles : Envoyer les lentilles et si possible le liquide de lavage dans un pot stérile à bouchon rouge contenant 2 ml de sérum physiologique stérile

Bon de demande & Renseignements nécessaires

Examens de microbiologie.

Préciser tout renseignement clinique potentiellement utile (immunodépression, port de lentilles, traumatisme cornéen...)

Transport

Les prélèvements doivent être transmis rapidement au laboratoire à température ambiante.

Sous-traitance

Les prélèvements sont transmis au laboratoire de parasitologie du CHU NICE