

Fiche de renseignements cliniques
**Dosage d'anticorps
anti-natalizumab**

MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT

- ▶ Prélever le sang 4 semaines après la dernière perfusion de TYSABRI®.
- ▶ Collecter suffisamment de sang de manière à obtenir au minimum 1 ml de sérum.
- ▶ Collecter le sang dans un tube sec (avec ou sans gel).

MODALITÉS D'ENVOI DES PRÉLÈVEMENTS

- ▶ Les échantillons doivent être transférés au laboratoire central d'analyses de l'hôpital.
- ▶ Le laboratoire doit centrifuger le tube (4000 tours/min ou 1500g pendant 10 à 15 minutes) et décanter le sérum. Il est recommandé d'envoyer uniquement le sérum.

Document à joindre :

Retourner le formulaire R69 ci-joint de demande de dosage des anticorps anti-natalizumab intégralement rempli avec le tube.

Conditionnement :

Les prélèvements peuvent être envoyés sans précaution particulière (le conditionnement à +4°C n'est pas nécessaire).

Jours d'envoi des échantillons :

Du lundi au vendredi. En fonction du type d'envoi choisi, il peut être préférable d'éviter les envois du vendredi.

Destinataire :

Laboratoire Eurofins Biomnis
78, avenue de Verdun - BP 110
94208 Ivry-sur-Seine cedex
Tél : 01 49 59 16 16 • Fax : 01 49 59 17 98

RÉCEPTION DES RÉSULTATS

Les résultats seront communiqués par courrier au neurologue prescripteur (si indiqué) dans un délai de **2 semaines environ** à compter de la réception du sérum par le laboratoire Eurofins Biomnis en charge du dosage des anticorps anti-natalizumab.